

ANNEAUX DE DÉCHARGE

DISPOSITIFS DE DÉCHARGE D'UNE
HYPERPRESSION LOCALISÉE



UTILISATIONS

Les anneaux de silicone constitués d'Epithelium 29™ sont des dispositifs de gel de silicone auto-adhésif biocompatible collé à un tissu.

Ils sont souples et élastiques. L'Epithelium 29™ se présente comme un gel répartiteur de pressions, idéal pour les zones du pied soumises à ces contraintes. De plus, il possède un pouvoir adhésif important.

Sa forme permet de limiter la pression en un point précis (au centre de l'anneau) et de la répartir sur les bords de ce dernier.

Son adhésivité est permanente car elle n'est pas due à de la colle mais à la formulation de ce silicone. Pour une adhésivité optimale, rincer à l'eau savonneuse et sécher avant application.

MODE D'UTILISATION

- Après le soin, sur une peau non lésée, sélectionner l'une des deux tailles d'anneaux (taille 1 pour les orteils et taille 2 pour la zone plantaire).
- Retirer le film plastique et appliquer l'anneau sur la zone.
- Recouvrir d'un sparadrap.

COMPOSITION

92% silicone, 8% tissu polyamide/élasthanne.

ENTRETIEN

Lavables à l'eau et au savon.

L'anneau doit être renouvelé dès qu'il présente des signes de détérioration.

Durée de vie : 5 utilisations en moyenne.