

# 3 ORTHÈSES CORRECTIVES RIGIDES HALLUX VALGUS

## ORTHÈSES RIGIDES DE NUIT - THERMOFORMABLES

### INDICATIONS

Le port quotidien d'une orthèse corrective de nuit EPITACT® aide à corriger la déformation de l'hallux valgus. Elle contribue à soulager les douleurs articulaires nocturnes et supprime les douleurs de contact. L'orthèse peut également s'utiliser durant les phases de repos la journée.

### CONTRE-INDICATIONS

- Gros orteil non mobile latéralement.
- Ne pas utiliser ce produit lors de la marche.
- Ne pas utiliser sur une lésion cutanée.
- Ne pas utiliser en cas de diabète, d'artérite, de polyneuropathie, de neuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Avant tout, vérifier que le gros orteil soit encore mobile latéralement lorsqu'on le manipule. Si ce n'est pas le cas, ne pas utiliser ce dispositif.
- L'orthèse peut être thermoformée indifféremment sur le pied droit ou le pied gauche.
- **THERMOFORMAGE** : Suivre la notice de thermoformage fournie. L'Orthèse corrective de nuit peut être thermoformée plusieurs fois.
- **MISE EN PLACE** :
  - Passer l'avant-pied dans le grand bracelet.
  - Enfiler ensuite le gros orteil dans le petit manchon.
  - Vous assurer que la cible blanche se situe au niveau de "l'exostose" (voir schéma sur la notice de thermoformage fournie).
- **CONDITIONS D'UTILISATION** :
  - Lors des 3 premières utilisations, il est recommandé de porter l'orthèse 2 heures uniquement.

- Lors des utilisations suivantes, l'orthèse peut être portée plusieurs heures. Des douleurs articulaires peuvent être ressenties lors des premières utilisations.
- Un 2<sup>ème</sup> thermoformage pour augmenter la correction pourra être mis en œuvre (voir notice de thermoformage fournie).

**COMPOSITION** : 52% plastique thermoformable, 28% tissu polyamide/élasthanne, 20% silicone.

### ENTRETIEN

- Laver en machine à 30°C dans le filet de lavage fourni ou à la main (sans frotter).
- Laisser sécher naturellement. Ne pas repasser. Ne pas exposer à la chaleur (>50°C).

**PRÉSENTATION** : Lot de 3.

Les matériaux ont fait l'objet d'une évaluation de la biocompatibilité selon la norme ISO 10 993-1 concernant les produits venant en contact avec la peau. Si un incident se produisait, il conviendrait de cesser immédiatement l'utilisation et de prévenir la société MILLET Innovation.

La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Marquage CE initial: 2015.



Lavable en machine à 30°C.



Pas de repassage, ni de vapeur.



Pas de nettoyage à sec.



Pas de chlorage.



Pas de séchage en machine.



Voir emballage.



**epitact®**

**MILLET INNOVATION**

Produits issus de la recherche MILLET Innovation.



MILLET Innovation - ZA Champgrand  
26270 Lorio/Drôme - FRANCE

podo.epitact.fr